



CERRAHİ SET BAKIM KILAVUZU



Ürünlerin Setten Çıkarılması

Cerrahi sette bulunan tüm ürünler dikkatlice çıkarılır.



Setin Aşamalarına Ayrılması

Setin kapak, orta ve alt kısımları birbirinden ayrılır.

- Ultrasonik Yıkama Hazırlığı: Ultrasonik yıkama cihazı saf su ile doldurulur.
- Yıkanacak her set için bir kapak ölçüsünde ameliyat sıvısı eklenir.
- Ultrasonik Yıkama: Ürünler, setin kapak, orta ve alt kısımlarına ayrılarak ultrasonik yıkama cihazına yerleştirilir.
- Yıkama işlemi 30 dakika boyunca gerçekleştirilir.



Ultrasonik Durulama

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, ürünler ultrasonik cihazında sadece saf su ile 30 dakika süreyle durulanır.



Kurutma

Durulanan ürünler etüv cihazına alınarak kurutma işlemi yapılır.



Setin Yeniden Birleştirilmesi

Setin kapak, orta ve alt kısımlarının nemi alınır ve ürünler uygun şekilde içlerine yerleştirilir.



Paketleme

Set, otoklav poşeti ile paketlenir.



Sterilizasyon

Paketlenmiş set, otoklav cihazında 1 saat süreyle sterilize edilir.



Kullanıma Hazırlık

Sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra set kullanıma hazır hale gelir.